


Test Kit dell'antigene COVID-19 (SARS – CoV – 2) (Oro Colloidale) Confezione singola

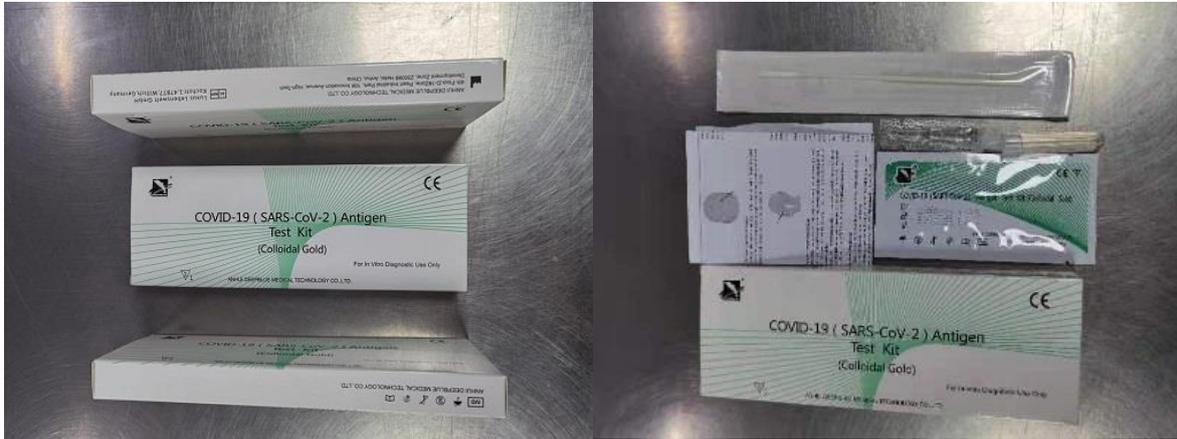

Quantità in pronta consegna: nr. 24.780

Descrizione:

Questo prodotto viene utilizzato per il rilevamento qualitativo in vitro dell'antigene di SARS-CoV-2 in tamponi naso-faringei (NP) o tamponi oro-faringei.

Questo kit utilizza il metodo del doppio sandwich di anticorpi per rilevare gli antigeni SARS-CoV-2. Quando una quantità appropriata di campione viene aggiunta ai pozzetti del campione del dispositivo di test, il campione si sposterà in avanti lungo il dispositivo di test. Se il campione contiene un antigene, l'antigene, questo si lega all'anticorpo SARS-CoV-2, marcato con l'oro colloidale presente sul tampone legante, formando un sandwich con un altro anticorpo rivestito contro SARS-CoV-2. Sulla linea del test comparirà una linea colorata visibile, che indica che l'antigene SARS-CoV-2 è positivo. Il dispositivo di test contiene anche il sistema di controllo di qualità del test medesimo. Tale controllo si dovrebbe realizzare mediante la comparsa di una linea rossa. La mancata visualizzazione della linea del controllo di qualità sta ad indicare che il risultato del test non è valido e che è necessario ripeterlo

Materiali forniti all'interno della confezione:

- 1) tampone sterilizzato
- 2) Provetta per estrazione dell'antigene
- 3) Reagente di estrazione
- 4) Dispositivo di prova
- 5) Istruzioni
- 6) Postazione di lavoro

Certificazione:

Il prodotto è completo di certificato CE.